

Numerys HC

Blocs et disque hybride
résine/céramique



Enhance your
daily practice*

Respect des contraintes
de mastication

Usinage rapide et adapté

Rendu esthétique naturel



Usinage rapide et esthétique de couronnes



Points forts

Respect des contraintes de mastication

- > Résistance à la flexion et à la compression

Usinage rapide et adapté

- > Pas d'étapes de cuisson ni d'émaillage
- > Adaptation marginale respectant l'anatomie (surfaces labiale et linguale)

Rendu esthétique naturel

- > Proche de la teinte naturelle de la dent et sans requérir de coloration
- > Plusieurs teintes disponibles (6) suivant le cas clinique

Indication

Fabrication indirecte d'éléments prothétiques de restauration sans métal : Inlays, Onlays, Facettes, Couronnes, Couronnes sur implants.

Numerys HC - 5 blocs

	Taille 12	Taille 14 L
Teinte A1	NYS-12A1	NYS-14A1
Teinte A2	NYS-12A2	NYS-14A2
Teinte A3	NYS-12A3	NYS-14A3
Teinte A3.5	NYS-12A3.5	NYS-14A3.5
Teinte B3	NYS-12B3	NYS-14B3
Teinte E	NYS-12E	NYS-14E

Numerys HC - 1 disque ø 98 mm - hauteur 16 mm

Teinte A2	NYS-D16A2
Teinte A3	NYS-D16A3
Teinte A3.5	NYS-D16A35
Teinte B3	NYS-D16B3
Teinte E	NYS-D16E

Cas clinique

Exemple de cas clinique du Dr Marco Morello



1 Radiologie préopératoire sur 36.



2 Situation initiale avant traitement.



3 Dépose de l'amalgame sous anesthésie tronculaire et remontée de marge de la partie distale sous-gingivale à l'aide du **Reflectys Flow A3**.



4 Protection du fond de cavité avec le **MTA Biorep**.



5 Application d'une couche de **Reflectys Flow A3** pour éliminer les contre-dépouilles en suivant le protocole classique de collage. Photopolymérisation pendant 20s puis polissage minutieux de la préparation.



6 Empreinte numérique de la dent préparée et ses voisines.



7 Usinage du bloc **Numerys HC A2/12**.



8 Mordançage avec du **Dentoetch** pendant 10s sur l'émail et la dentine en isolant la surface mésiale de la 37 avec un ruban de teflon.



9 Appliquer une couche de glycérine et photopolymériser 10s de chaque face de l'inlay-onlay.



10 Inlay-onlay après collage et polissage.



Enhance your daily practice

itena-clinical.com

Central Parc Bat B, 97 Allée de la Louve, 93420 Villepinte - FRANCE - T. + 33 1 45 91 61 40.
FPNUMERYSHC.FR | IND.A 01/24

Rejoignez-nous!



*Améliorer votre pratique quotidienne

Dispositif Médical Classe IIa, CE 0425 - Fabricant : itena Clinical. Réservé à l'usage professionnel dentaire, non remboursé par les organismes d'assurance maladie au titre de la LPPR. Lire attentivement la notice ou l'étiquetage avant toute utilisation.