

# Pure Light

Kit d'éclaircissement  
ambulatoire premium



Qualité de l'éclaircissement

Praticité d'utilisation

Stockage et transport  
à température ambiante

Enhance your  
daily practice\*



# Appréciez votre sourire !

## Points forts

### Qualité de l'éclaircissement

- > Pas d'attaque acide de la dentine, PH neutre
- > Viscosité du gel élevée

### Praticité d'utilisation

- > Gel applicable au pinceau
- > Temps de traitement de 10 ou 15 min
- > Gouttière de maintien du gel pendant le traitement

### Stockage et transport à température ambiante

- > Formule HPS\*\* brevetée



## Indication

Éclaircissement dentaire en ambulatoire à base de 6% de peroxyde d'hydrogène supérieur.

## Mode d'utilisation

1. Se brosser les dents et rincer à l'eau.
  2. Tourner l'arrière du stylo gel pour faire sortir le gel.
  3. Appliquer le gel sur la surface de la dent.
- 10-15 min.**
4. Placer la gouttière en bouche et mordre légèrement.
  5. Allumer la lumière LED :
    - Traitement de 15 minutes (mode bleu).
    - Traitement de 10 minutes (mode bleu et rouge).
  6. Se rincer de nouveau la bouche.
  7. Rincer la gouttière avec de l'eau.
  8. Apprécier le résultat final.

### Pure Light

Kit d'éclaircissement Premium  
3 stylos gel + 1 gouttière LED + 1 câble USB

PRLI2.5-3

\*\*Hydrogen Peroxide Superior (Peroxyde d'hydrogène supérieur)



Enhance your daily practice

[itena-clinical.com](http://itena-clinical.com)

Central Parc Bat B, 97 Allée de la Louve, 93420 Villepinte - FRANCE - T. + 33 1 45 91 61 40.  
FP.PURELIGHT.FR-B-04/2024

Rejoignez-nous!



\*Améliorer votre pratique quotidienne

Produit cosmétique non remboursé. Fabricant : Cavex Holland BV, Pays-Bas  
Lire attentivement la notice ou l'étiquetage avant toute utilisation.