

# Pure Office

Kit d'éclaircissement intra canalaire  
en cabinet



Qualité de l'éclaircissement

Goût menthe

Choix du conditionnement

Enhance your  
daily practice\*



# Le choix du professionnel



## Points forts

### Eclaircissement professionnel

- > Traitement au cabinet en 1 à 3 étapes

### Qualité de l'éclaircissement

- > PH neutre pour faciliter la libération complète du peroxyde et assurer un confort patient

### Goût menthe

### Choix de conditionnement

- > **Kit intro** : 1 seringue de 5 g Pure Office + 2 seringues Pure Protect
- > **Value Pack** : 3 seringues de 5 g Pure Office + 6 seringues Pure Protect

## Indications

- Blanchiment de dents tachées dévitalisées.
- Blanchiment de dents tachées en raison de maladies, de traumatismes ou pour des raisons iatrogènes, comme alternative aux couronnes ou aux couronnes à incrustation vestibulaire.
- Traitement de colorations dentaires dues à des médicaments (p. ex. la tétracycline).

### Pure Office

**Kit Intro** 1 seringue de 5 g de gel d'éclaircissement dentaire + 2 seringues de barrière gingivale Pure Protect

PROF35-C1\*\*

**Value Pack** 3 seringues de 5 g de gel d'éclaircissement dentaire + 6 seringues de barrière gingivale Pure Protect

PROF35-RF3\*\*

## Cas clinique




**1** Sortez la seringue du réfrigérateur et laissez-la revenir à température ambiante. Protégez la dent à éclaircir par la mise en place d'un champ opératoire.



**2** Évaluez la qualité de l'obturation canalair afin de prévenir tout risque de propagation du produit.




**3** Nettoyez la chambre pulpaire : éliminez les résidus de tissus pulpaire et nécrotiques.

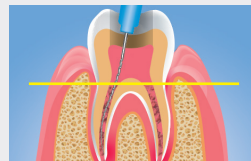

**4** Le canal doit être désobturé à 3 mm environ au-dessous de la jonction amélo-cémentaire. Isolez l'obturation en gutta-percha par la mise en place d'un petit bouchon de verre ionomère.



**5** Placez l'embout mélangeur sur la seringue **Pure Office**.

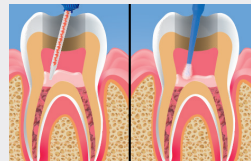

**6** Diffusez le produit dans le canal préparé et tassez le produit dans la cavité avec un micro-applicateur.



**7** Réalisez la fermeture provisoire à l'aide d'un matériau étanche.



**8** Réalisez un contrôle 7 jours après l'intervention. Renouvelez l'application du produit si nécessaire.

Lorsque l'éclaircissement est satisfaisant, rincez, séchez et placez une obturation provisoire pendant 5 semaines avant la reconstitution définitive.



Enhance your daily practice

[itena-clinical.com](http://itena-clinical.com)

Central Parc Bat B, 97 Allée de la Louve, 93420 Villepinte - FRANCE - T. + 33 1 45 91 61 40.  
FR.PUREOFFICE.FR-B-04/2024

Rejoignez-nous!

